

Selbsttest für Schüler (formuliert für Rechtshänder)


Helfende Personen bitte FFP2 Maske und Handschuhe anziehen!

Alle Schüler müssen sich morgens in der Pausenhalle die Hände desinfiziert haben!

1. Silbernen Verpackungsbeutel öffnen und Teststreifenbox (Pfeil) auf den Tisch legen. Müll inkl. Beutelchen beiseiteschieben.



2. Beutel mit dem Abstrichtupfer so öffnen, dass man den Tupfer später mit einer Hand entnehmen kann. Müll beiseiteschieben.

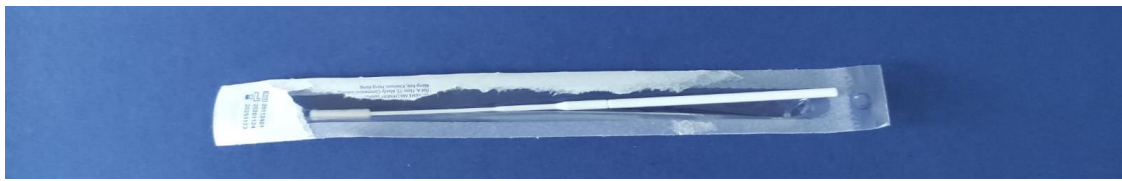

3. Das Röhrchen mit der Flüssigkeit in die linke Hand nehmen und den Folienverschluss abziehen.




4. Das Röhrchen in der linken Hand lassen und gleichzeitig Abstrichtupfer am Griff rausziehen (nicht am Wattebausch!)



5. Kopf leicht nach hinten neigen. Abstrichtupfer mit Wattebausch voran circa 2 cm tief in das erste Nasenloch (parallel zum Gaumen) langsam und vorsichtig einführen, bis man einen Widerstand spürt.

Probenentnahme

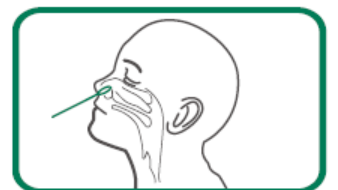


6. Abstrichtupfer mindestens 4-mal drehen (circa 15 Sekunden).

7. Vorgang mit zweitem Nasenloch wiederholen.

8. Abstrichtupfer in Röhrchen mit der Flüssigkeit tunken und öfter als 10-mal hin und her drehen.

9. WICHTIG!!!! Röhrchen zusammendrücken und gesamte Flüssigkeit aus dem Tupfer pressen!

Gebrauchten Tupfer auf die Tupferverpackung legen (nicht auf den Tisch).

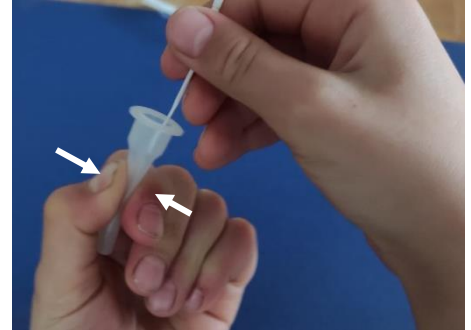

10. Röhrchen fest mit der Spenderkappe verschließen.



11. Röhrchen senkrecht über das runde markierte Feld halten und genau 4 Tropfen auf das Feld geben. Vorsichtig, Tropfen kommen superschnell raus!



12. Stoppuhr auf 15 Minuten stellen und Testergebnis Nach 15-30 Minuten ablesen.

Negatives Testergebnis: nur Vorhandensein der Kontrolllinie (C), aber keine Testlinie (T)

Positives Testergebnis: Vorhandensein von 2 Linien! - Kontrolllinie (C) und (T), auch wenn (T) nur schwach sichtbar ist, gilt dies als positiv.

Positives Testergebnis: Der Schüler packt seine Sachen zusammen und begibt sich auf den Schulhof und hält Abstand zu anderen. Die Eltern werden über das Sekretariat benachrichtigt, ihr Kind abzuholen. Die Eltern nehmen bitte unverzüglich Kontakt zum Hausarzt oder Gesundheitsamt auf.

Ungültiges Testergebnis: Wenn keine Kontrolllinie sichtbar ist, sollte der Test wiederholt werden!